

seT PP
ΑΥΤΟΑΔΡΟΠΟΙΗΤΙΚΗ, ΑΥΤΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΡΗΤΙΝΩΔΗΣ ΚΟΝΙΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Το seT PP είναι μια αυτοαδροποιητική, αυτοσυγκολλητική ρητινώδης κονία διπλού πολυμερισμού, η οποία απελευθερώνει φθόριο και διατίθεται σε σύστημα πάστα /πάστα. Το seT PP σχεδιάστηκε για τη συγκόλληση έμμεσων κεραμικών, μεταλλικών ή ρητινωδών ένθετων και επένθετων καθώς και στεφανών, γεφυρών, αξόνων και όψεων.

ΣΥΝΘΕΣΗ:

35% κατά βάρος, μεθυλακρυλικός εστέρας.

65% κατά βάρος, ανόργανη ενίσχυση .

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ:

Κεραμικά, μεταλλικά ή ρητινώδη ένθετα, επένθετα, στεφάνες, γέφυρες, άξονες και όψεις.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ:

Το προϊόν μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό του δέρματος σε ορισμένους ανθρώπους. Σε αυτές τις περιπτώσεις, διακόψτε τη χρήση και ζητήστε ιατρική βοήθεια.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΟΝΤΙΟΥ:

1. Επιλέξτε την κατάλληλη απόχρωση του seT PP.
2. Αφαιρέστε την προσωρινή αποκατάσταση και καθαρίστε το κολόβωμα ή την κοιλότητα επιμελώς, χρησιμοποιώντας ελαφρόπετρα ελεύθερη λαδιού για να απομακρύνετε κάθε υπόλειμμα προσωρινής κονίας (ΣΗΜΕΙΩΣΗ: η προσωρινή αποκατάσταση πρέπει να συγκολλάται μόνο με κονία ελεύθερη ευγενόλης).
3. Δοκιμάστε την αποκατάσταση.
4. Πάλι, καθαρίστε με νερό και στεγνώστε, όμως ΜΗΝ ΑΦΥΔΑΤΩΣΕΤΕ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περιπτώσεις που είναι απαραίτητη η προστασία του πολφού, χρησιμοποιήστε ένα ουδέτερο στρώμα υδροξειδίου του ασβεστίου που σκληραίνει όταν πήζει, πριν να κάνετε την τελική αποτύπωση. Ουσίες όπως, το υπεροξείδιο του υδρογόνου, απευαισθητοποιητικά, απολυμαντικά, αγγειοσυσπαστικά και αποφρακτικά οδοντίνης, δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται καθώς υπολείμματά τους μπορεί να επηρεάσουν την αντοχή δεσμού και την αντίδραση πήξης.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ:

Καθαρίστε επιμελώς και προετοιμάστε την αποκατάσταση σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΡΙΓΓΑΣ:

Αφαιρέστε το καπάκι. Βγάλτε 2-3mm υλικού σε ένα μπλοκ και πετάξτε το (για να εξασφαλίσετε τη σωστή αναλογία εξώθησης.) Τοποθετήστε ένα ρύγχος ανάμειξης στη σύριγγα.

ΑΝΑΜΕΙΞΗ ΜΕ ΤΟ ΧΕΡΙ:

Χωρίς να τοποθετήσετε το ρύγχος ανάμειξης, εξωθήστε ίσα ποσά υλικού πάνω σε ένα μπλοκ ανάμειξης. Με μια κατάλληλη σπάτουλα, αναμειξτε τις δύο πάστες για 30 δευτερόλεπτα.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ seT PP:

1. Προστατέψτε την περιοχή εργασίας από την επιμόλυνση από ενδοστοματικά υγρά.
2. Τοποθετήστε ή εξωθήστε το seT PP ομοιόμορφα σε όλες τις, προς συγκόλληση, επιφάνειες της αποκατάστασης και του δοντιού. **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Μη χρησιμοποιείτε σπείρες Lentulo για να εισχωρήσετε την κονία στους ριζικούς σωλήνες καθώς αυτό μπορεί να επιταχύνει υπερβολικά την πήξη της. Επίσης, για να αποφύγετε την παγίδευση αέρα, δονείτε τους άξονες κατά την εισχώρησή τους στο ριζικό σωλήνα. **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Στην περίπτωση των όψεων, χρησιμοποιήστε ένα συγκολλητικό παράγοντα (Go!, Stae κτλ, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε διαδικασίας αδροποίησης) πριν το seT PP, για να βελτιώσετε την αντοχή συγκράτησης. Συγκολλήστε μόνο 1-2 όψεις τη φορά, λόγω του περιορισμένου χρόνου εργασίας της πάστας.

Χρόνος εργασίας σε θερμοκρασία δωματίου	2 λεπτά
Καθαρός χρόνος πήξης σε θερμοκρασία στόματος	5 λεπτά
Χρόνος φωτοπολυμερισμού	20 δευτερόλεπτα

Σημείωση: Οι χρόνοι αυτοί είναι κατά προσέγγιση και μπορεί να ποικίλουν ανάλογα με τις συνθήκες αποθήκευσης, την υγρασία, την ηλικία του προϊόντος και τη θερμοκρασία.

3. Τοποθετήστε την αποκατάσταση και αφήστε για 30 δευτερόλεπτα πριν κάνετε φωτοπολυμερισμό.
4. Καθαρίστε τις περίσσειες του υλικού μετά από φωτοπολυμερισμό 2 δευτερολέπτων ή μετά από 2 λεπτά από την αρχή της ανάμειξης. **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Εάν η περίσσεια της κονίας αφαιρείται με ένα τολύπιο ή κάτι παρόμοιο, αφήστε ένα ελάχιστο ποσό περίσσειας αφού τοποθετήσετε την αποκατάσταση στη θέση της. Αμέσως μετά, είτε φωτοπολυμερίστε σύντομα την περίσσεια ή εάν την αφήσετε να αυτοπολυμεριστεί, καλύψτε την περίσσεια με ζελέ γλυκερίνης για να εμποδίσετε την αναστολή της πήξης από το οξυγόνο.
5. Φωτοπολυμερίστε επιμελώς για να επιταχύνετε την διαδικασία πήξης (το ελάχιστο 20 δευτερόλεπτα ανά επιφάνεια). Στην περίπτωση ρητινωδών ή ολοκεραμικών υλικών, φωτοπολυμερίστε το seT PP μέσω της αποκατάστασης.
6. Στιλβώστε την περιοχή των ορίων.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ:

Αποθηκεύστε σε θερμοκρασίες μεταξύ 2° και 25°C (35°-77°F).

Το ψυγείο είναι προαιρετικό, για καλύτερη φρεσκάδα του προϊόντος.

Χρησιμοποιήστε το σε θερμοκρασία δωματίου, μεταξύ 20° και 25° C (68° -77° F)

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:

Μόνο για επαγγελματική χρήση.

Κρατείστε το μακριά από τα παιδιά.

Να μη λαμβάνεται εσωτερικά.

Να μη χρησιμοποιείται μετά την ημερομηνία λήξης.

Προσοχή: ο ομοσπονδιακός νόμος περιορίζει την πώληση του υλικού σε ή με εντολή οδοντιάτρου.

MSDS διαθέσιμα στο www.sdi.com.au ή επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο.

Ημερομηνία έκδοσης της τελευταίας αναθεώρησης : Ιούλιος 2009

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ:

Επαφή με τα μάτια: Ξεπλύνετε πολύ καλά με νερό και ζητήστε ιατρική βοήθεια.

Επαφή με το δέρμα: Απομακρύνετε το χρησιμοποιώντας ένα ύφασμα ή σπόγγο διαποτισμένο με οινόπνευμα. Ξεπλύνετε πολύ καλά με νερό.

Κατάποση: Πιείτε πολύ νερό/γάλα. Εάν τα συμπτώματα επιμένουν ζητήστε ιατρική βοήθεια.

Εισπνοή: Δεν αναμένονται συμπτώματα.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ:

- Σύριγγες 7g
- Διαθέσιμες αποχρώσεις : A1, A2, OA3, Ημιδιαφανής, Λευκή Αδιαφανής.
- Ασσορτί συσκευασία που περιλαμβάνει μια σύριγγα σε καθεμιά από τις αποχρώσεις A1, A2, OA3, Ημιδιαφανή, Λευκή Αδιαφανή και 70 ρύγχη ανάμειξης.
- Ρύγχη ανάμειξης – συσκευασία των 50 τεμαχίων.