



YOUR SMILE. OUR VISION.



# RIVA

## Υαλοϊονομερή



**Vitsaropoulos**  
COMPLETE DENTAL SOLUTIONS

Μεσογείων 348, 153 41 Αγ. Παρασκευή • T: 210 65 41 340 F: 210 65 41 618  
[info@vitsaropoulos.gr](mailto:info@vitsaropoulos.gr) + [vitsaropoulos.gr](http://vitsaropoulos.gr) + [facebook.com/vitsaropoulos](https://facebook.com/vitsaropoulos)



**Υαλοϊονομερής κονία συγκόλλησης, με υψηλή απελευθέρωση φθορίου. Αυτοπολυμεριζόμενη και ακτινοσκιερή.**

## ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

- Συγκόλληση μεταλλικών ή μεταλλοκεραμικών ένθετων, επένθετων και στεφανών
- Συγκόλληση στεφανών από ανοξείδωτο ατσάλι
- Συγκόλληση αξόνων
- Συγκόλληση μεταλλικών ορθοδοντικών δακτυλίων
- Χρήση ως ουδέτερο στρώμα ή υλικό βάσης.

## ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- **Υψηλή απελευθέρωση φθορίου.**  
Χάρη στη βιοδραστική, πατενταρισμένη τεχνολογία **ionglass**, το Riva Luting απελευθερώνει σημαντικά περισσότερο φθόριο, βοηθώντας την επαναμεταλλικοποίηση του δοντιού.
- **Χαμηλή διαλυτότητα.**
- **Αποδεδειγμένη αντιμικροβιακή δράση.**  
Συγκρινόμενο με άλλα υλικά που απελευθερώνουν φθόριο, όπως ρητινώδεις κόλλες, το Riva Luting έχει αποδείξει αντιμικροβιακή δράση κατά τριών τερηδογόνων βακτηρίων: *Streptococcus mutans*, *Streptococcus sobrinus* και *Lactobacillus*.
- **Ο επαρκής χρόνος εργασίας και ο γρήγορος χρόνος πήξης** του Riva Luting μειώνουν την παραμονή του ασθενή στην έδρα κι εξασφαλίζουν πρόωμη αντίσταση.
- **Υψηλή αντοχή στην κάμψη 20,1 MPa.**
- **Πολύ μικρό πάχος στρώματος.**

Το Riva Luting διατίθεται σε universal ανοικτή κίτρινη απόχρωση.








## ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

### Riva Luting κάψουλες.

Περιλαμβάνει 50 κάψουλες Riva Luting

### Riva Luting μεγάλη συσκευασία σκόνης/υγρού.

Περιλαμβάνει φιαλίδιο σκόνης 35g, φιαλίδιο υγρού 25g (24,3ml), 1 πλαστικό κουταλάκι και 1 μπλοκ ανάμειξης

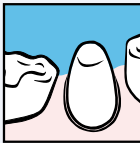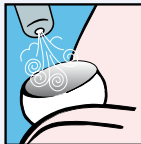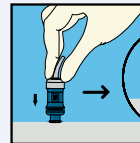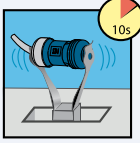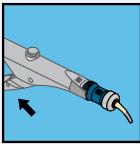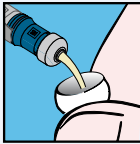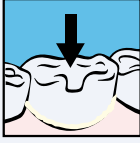- 1**  Παρασκευάστε το δόντι σύμφωνα με τις κλασικές τεχνικές.
- 2**   Βεβαιωθείτε ότι η εσωτερική επιφάνεια της αποκατάστασης είναι καθαρή, στεγνή και προετοιμασμένη σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- 3**   Ενεργοποιήστε την κάψουλα και **αμέσως** δονήστε την σε δονητή αμαλγάματος για 10 δευτ. **πριν** την τοποθετήσετε στο εργαλείο εφαρμογής.  
Πιέστε την κάψουλα σε σταθερή επιφάνεια.
- 4**  **Αμέσως** τοποθετήστε την κάψουλα στο εργαλείο εφαρμογής και πιέστε τη σκανδάλη μέχρι η πάστα να φανεί μέσα από το διαφανές ρύγχος.
- 5**  Τοποθετήστε περίπου 1 mm κονίας στην επιφάνεια συγκόλλησης.
- 6**  Τοποθετήστε την αποκατάσταση στη θέση της μέσα σε 30 δευτερόλεπτα.
- 7**  Αφαιρέστε την περίσσεια της κονίας όταν αυτή φτάσει σε σύσταση ζελέ (περίπου 2 λεπτά από την αρχή της ανάμειξης).
- 8**  Διατηρήστε την απομόνωση μέχρι να επιβεβαιωθεί η πήξη (περίπου σε 4 λεπτά και 35 δευτερόλεπτα από την αρχή της ανάμειξης).

# RIVA luting plus



**Ρητινωδώς τροποποιημένη, υαλοϊονομερής κονία συγκόλλησης προσθετικών εργασιών, αυτοπολυμεριζόμενη.**

## ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

- Συγκόλληση ρητινωδών, μεταλλικών ή μεταλλοκεραμικών στεφανών και γεφυρών, ένθετων και επένθετων
- Συγκόλληση κεραμικών ένθετων
- Συγκόλληση ενδορριζικών αξόνων
- Συγκόλληση ενισχυμένων ολοκεραμικών στεφανών

## ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- **Υψηλή απελευθέρωση φθορίου.**  
Χάρη στη βιοδραστική, πατενταρισμένη τεχνολογία **ionglass**, το Riva Luting Plus απελευθερώνει σημαντικά περισσότερο φθόριο, βοηθώντας την επαναμεταλλικοποίηση του δοντιού.
- **Κλινικά αδιάλυτο όταν πήξει.**
- **Υψηλή αντοχή συγκόλλησης.**  
Το Riva Luting Plus έχει εξαιρετική σύνδεση με την οδοντίνη και τη ζirkονία. Είναι πολύ καλό για συγκόλληση κεραμικών στεφανών και ένθετων.
- **Ο επαρκής χρόνος εργασίας και ο γρήγορος χρόνος πήξης** του Riva Luting Plus μειώνουν την παραμονή του ασθενή στην έδρα κι εξασφαλίζουν πρώιμη αντίσταση στις μαστικές δυνάμεις.
- **Δεν περιέχει BPA.**
- **Υψηλή αντοχή στην κάμψη 22 MPa.**
- **Πολύ μικρό πάχος στρώματος.**

Το Riva Luting Plus διατίθεται σε universal ανοικτή κίτρινη απόχρωση.

## ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

**Riva Luting Plus κάψουλες.**

Περιλαμβάνει 50 κάψουλες


**Riva Luting Plus σκόνη/υγρό.**

Περιλαμβάνει 10g (8,95ml) φιαλίδιο υγρού, 25g βάζο σκόνης και βοηθήματα.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

### για συγκόλληση στεφάνης




- 1** Παρασκευάστε το οδοντικό κολόβωμα. Τοποθετήστε το Riva Conditioner για 10 δευτερόλεπτα. Ξεπλύνετε και στεγνώστε. Μην αφυδατώσετε.

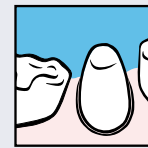

- 2** Βεβαιωθείτε ότι η εσωτερική επιφάνεια της αποκατάστασης είναι καθαρή, στεγνή και προετοιμασμένη σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.




- 3** Ενεργοποιήστε την κάψουλα και **αμέσως** δονήστε την σε δονητή αμαλγάματος για 10 δευτ. **πριν** την τοποθετήσετε στο εργαλείο εφαρμογής.

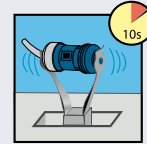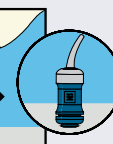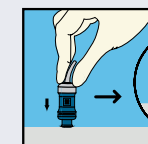


Πιέστε την κάψουλα σε σταθερή επιφάνεια.


- 4** **Αμέσως** τοποθετήστε την κάψουλα στο εργαλείο εφαρμογής και πιέστε τη σκανδάλη μέχρι η πάστα να φανεί μέσα από το διαφανές ρύγχος.

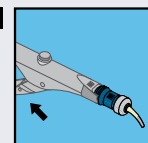

- 5** Τοποθετήστε περίπου 1 mm κονίας στην επιφάνεια συγκόλλησης.

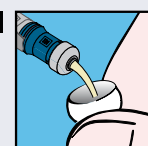

- 6** Τοποθετήστε την αποκατάσταση στη θέση της μέσα σε 30 δευτερόλεπτα από την ολοκλήρωση της ανάμειξης.

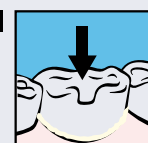

- 7** Αφαιρέστε την περίσσεια της κονίας όταν αυτή φτάσει σε σύσταση ζελέ (περίπου 2 λεπτά από την αρχή της ανάμειξης).



- 8** Διατηρήστε την απομόνωση μέχρι να επιβεβαιωθεί η πήξη (σε περίπου 4,5 λεπτά από την αρχή της ανάμειξης).



# RIVA self cure HV



ionglass  
BIOMIMETIC FORMULA

**Αυτοπολυμεριζόμενο υαλοϊονομερές υλικό αποκατάστασης, με υψηλό ιξώδες.**

Το υψηλό ιξώδες επιτρέπει εξαιρετική τοποθέτηση του υλικού σε ποσότητα και εύκολη διαμόρφωση.

## ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

- Αποκαταστάσεις I & II ομάδας σε περιοχές χωρίς πίεση
- Αποκαταστάσεις σε νεογιλά δόντια
- Αποκαταστάσεις σε ηλικιωμένα άτομα
- Ενδιάμεσο υλικό και βάση για κοιλότητες I & II ομάδας χρησιμοποιώντας την τεχνική σάντουιτς
- Αποκαταστάσεις ομάδας V
- Κατασκευή κολοβωμάτων
- Προσωρινές εμφράξεις
- Αντικατάσταση οδοντίνης

## ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

### • Το ανθεκτικότερο υλικό για την αντικατάσταση οδοντίνης

Το Riva Self Cure HV έχει υψηλή αντοχή στη συμπίεση, όπως και η οδοντίνη, εξασφαλίζοντας ότι θα αντέξει τις μακροχρόνιες μαστικές δυνάμεις.

Αντοχή στη συμπίεση: 370 MPa

### • Ιδανικό για την ελάχιστη επεμβατική Οδοντιατρική

Είναι ένα βιοδραστικό υλικό που συγκλλάται στην οδοντική ουσία χωρίς να χρειάζεται συγκολλητικούς παράγοντες κι απελευθερώνει φθόριο εμποδίζοντας τη δημιουργία νέας τερηδόνας.

Έτσι, δεν απαιτούνται μεγάλες κοιλότητες ούτε σημεία συγκράτησης

### • Υψηλή απελευθέρωση φθορίου

Χάρη στη βιοδραστική, πατενταρισμένη τεχνολογία  το Riva Self Cure HV απελευθερώνει σημαντικά περισσότερο φθόριο, βοηθώντας την επαναμεταλλικοποίηση του δοντιού

### • Ελεύθερο HEMA και BPA

### • Υψηλή αντοχή στη φθορά: 99 μm

### • Αντοχή στη διάβρωση από οξέα

### • Υψηλή ακτινοσκιερότητα: 290% AL

Το Riva Self Cure HV διατίθεται σε κάψουλες στις αποχρώσεις A1, A2, A3, A3.5.

## ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

### Riva Self Cure HV κάψουλες.

50 κάψουλες Riva Self Cure HV μεμονωμένα σε καθεμία από τις αποχρώσεις: A1, A2, A3, A3.5.


### Riva Self Cure - συσκευασία σκόνης/υγρού.

(Διατίθεται μόνο σε Riva Self Cure κανονικού ιξώδους)


Περιλαμβάνει 15g φιαλίδιο σκόνης και 6,9 ml (8g) φιαλίδιο υγρού σε καθεμία από τις αποχρώσεις: A1, A2, A3, A3.5, A4, B2, B3

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ


- 1 Απομονώστε το δόντι, παρασκευάστε την κοιλότητα. Τοποθετήστε Riva Conditioner για 10 δευτερόλεπτα.

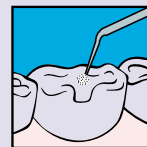




- 2 Ξεπλύνετε σχολαστικά.

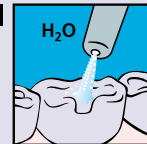

- 3 Αφαιρέστε την περίσσεια νερού. Διατηρήστε την υγρασία.

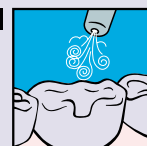


- 4 Ενεργοποιήστε την κάψουλα και αμέσως δονήστε την σε δονητή αμαλγάματος για 10 δευτ. πριν την τοποθετήσετε στο εργαλείο εφαρμογής.

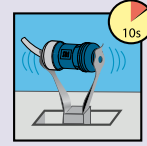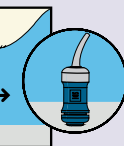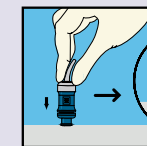

Πιέστε την κάψουλα σε σταθερή επιφάνεια.



- 5 Αμέσως τοποθετήστε την κάψουλα στο εργαλείο εφαρμογής και πιέστε τη σκανδάλη μέχρι το υλικό να φανεί στο ρύγχος της κάψουλας.

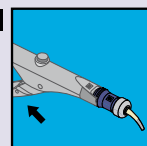

- 6 Εξωθήστε το Riva Self Cure HV στην κοιλότητα και διαμορφώστε.



- 7 Τοποθετήστε Riva Coat και φωτοπολυμερίστε.

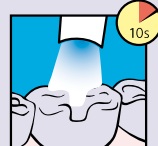
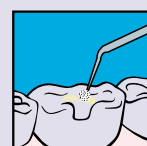


- 8 Αρχίστε το τελικό φινιρίσμα κάτω από σπρέι νερού.



Χρόνος έναρξης φινιρίσματος από την αρχή της ανάμειξης:  
Riva Self Cure: 6 λεπτά  
Riva Self Cure HV: 5 λεπτά

- 9 Τοποθετήστε Riva Coat και φωτοπολυμερίστε.

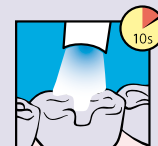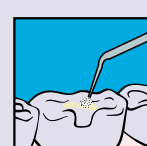

# RIVA light cure HV



ionglass  
BIOMIMETIC FORMULA

**Φωτοπολυμεριζόμενο υαλοϊονομερές υλικό αποκατάστασης με υψηλό ιξώδες.**

Το υψηλότερο ιξώδες επιτρέπει τον ευκολότερο χειρισμό του υλικού, αμέσως μετά την ανάμειξη. Το υλικό διαμορφώνεται εξαιρετικά και δεν κολλά στα εργαλεία, ούτε ανασπώνεται μετά την τοποθέτηση, ιδιαίτερα στην άνω γνάθο.

## ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

- Αποκαταστάσεις I & II ομάδας σε περιοχές χωρίς πίεση
- Αποκαταστάσεις III ομάδας
- Αυχενικές αποκαταστάσεις
- Αποκαταστάσεις σε νεογιλά δόντια
- Αποκαταστάσεις σε ηλικιωμένα άτομα
- Κατασκευή κολοβωμάτων
- Προσωρινές εμφράξεις
- Χρήση ως βάση/αντικατάσταση οδοντίνης
- Τεχνική σάντουιτς σε συνδυασμό με σύνθετη ρητίνη



## ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- **Συνδυασμός των πλεονεκτημάτων των υαλοϊονομερών και των σύνθετων ρητινών.**  
Συνδυάζει πολύ καλή αισθητική με απελευθέρωση φθορίου και χημικό δεσμό με τις οδοντικές ουσίες.
- **Εξαιρετικός χειρισμός λόγω του υψηλού ιξώδους.**  
Δεν κολλά στα εργαλεία κατά την τοποθέτηση ούτε δημιουργεί ίνες επάνω τους.
- **Υψηλή απελευθέρωση φθορίου.**  
Χάρη στη βιοδραστική, πατενταρισμένη τεχνολογία ionglass, το Riva Light Cure HV απελευθερώνει υψηλή ποσότητα φθορίου, βοηθώντας την επαναμεταλλικοποίηση του δοντιού.
- **Υψηλή σταθερότητα χρώματος.**
- **Μακροχρόνια αντίσταση στα οξέα.**
- **Υψηλή αντοχή στην κάμψη**

Το Riva Light Cure HV διατίθεται σε κάψουλες, στις αποχρώσεις A1, A2, A3, A3.5 και B1.

## ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

### Riva Light Cure HV - κάψουλες.

50 κάψουλες μεμονωμένα στις αποχρώσεις: A1, A2, A3, A3.5, B1

### Riva Light Cure - συσκευασία σκόνης/υγρού.

(Διατίθεται μόνο σε Riva Light Cure κανονικού ιξώδους)

Περιλαμβάνει φιαλίδιο σκόνης 15g, φιαλίδιο υγρού 7,2 ml (8g) και βοηθήματα.

Διατίθεται σε καθμία από τις αποχρώσεις: A1, A2, A3, A3.5, A4, B2, B3, B4, C2, C4, λεύκανσης.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ


- 1 Απομονώστε το δόντι, παρασκευάστε την κοιλότητα. Τοποθετήστε Riva Conditioner για 10 δευτερόλεπτα.




- 2 Ξεπλύνετε σχολαστικά.



- 3 Αφαιρέστε την περίσσεια νερού. Διατηρήστε την υγρασία.

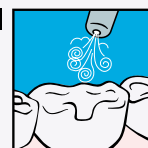


- 4 Ενεργοποιήστε την κάψουλα και αμέσως δονήστε την σε δοντική αμαλγάματος για 10 δευτ. πριν την τοποθετήσετε στο εργαλείο εφαρμογής.

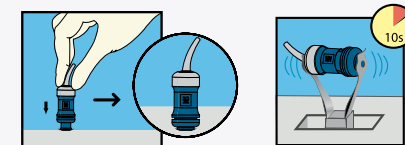


Πιέστε την κάψουλα σε σταθερή επιφάνεια.


- 5 Αμέσως τοποθετήστε την κάψουλα στο εργαλείο εφαρμογής και πιέστε τη σκανδάλη μέχρι το υλικό να φανεί στο ρύγχος της κάψουλας.

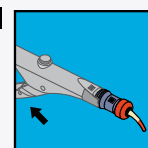


- 6 Εξωθήστε το Riva Light Cure HV στην κοιλότητα, σε στρώματα πάχους όχι μεγαλύτερου από 2 mm και διαμορφώστε.

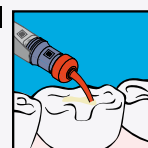

- 7 Φωτοπολυμερίστε κάθε στρώμα για 20 δευτ.

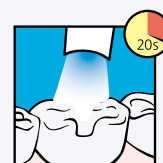

- 8 Το τελικό φινιρίσμα κάτω από σπρέι νερού, μπορεί να ξεκινήσει αμέσως μετά τον φωτοπολυμερισμό.

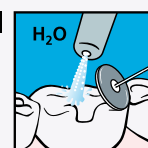





**Ενισχυμένο με άργυρο, υαλοϊονομερές υλικό αποκατάστασης, χωρίς υδράργυρο.**

## ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

- Κατασκευές κολοβωμάτων
- Μικρές αποκαταστάσεις I και II ομάδας
- Αποκαταστάσεις σε νεογιλά δόντια
- Αποκαταστάσεις σε ηλικιωμένους ασθενείς
- Χρήση σαν υλικό βάσης για κοιλότητες I και II ομάδας με την τεχνική σάντουιτς
- Αποκαταστάσεις V ομάδας, όπου δεν υπάρχει ζήτημα αισθητικής

## ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- **Είναι εξαιρετικό για κατασκευή κολοβωμάτων γιατί:**
  - παρουσιάζει υψηλή πρώιμη αντοχή στη συμπίεση 134 MPa σε 1 ώρα
  - συγκολλάται εξαιρετικά με τους οδοντικούς ιστούς
- **Υψηλή απελευθέρωση φθορίου.**  
Χάρη στη βιοδραστική, πατενταρισμένη τεχνολογία **ionglass**, το Riva Silver απελευθερώνει σημαντικά περισσότερο φθόριο, βοηθώντας την επαναμεταλλικοποίηση του δοντιού.
- **Εύκολος χειρισμός** χάρη στη συμπακνώσιμη σύσταση του Riva Silver.
- **Ιδανικό υλικό για μη συνεργάσιμους ασθενείς και για περιοχές όπου είναι δύσκολος ο έλεγχος της υγρασίας.**
- **Έχει υψηλή ακτινοσκιερότητα**

Το Riva Silver έχει ανοιχτό γκρι χρώμα.


## ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

**Riva Silver κάψουλες.**

Περιλαμβάνει 50 κάψουλες

Απομονώστε το δόντι, παρασκευάστε την κοιλότητα.


- 1** Τοποθετήστε Riva Conditioner για 10 δευτ.

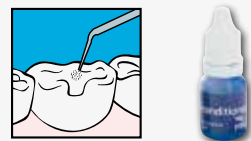


- 2** Ξεπλύνετε σχολαστικά.




- 3** Απομακρύνετε την περίσσεια νερού. Διατηρήστε την υγρασία.

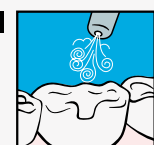

- 4** Δονήστε την κάψουλα σε έναν δοντή αμαλγάματος ή αναμείξτε τη σκόνη με το υγρό σε μπλοκ ανάμειξης.

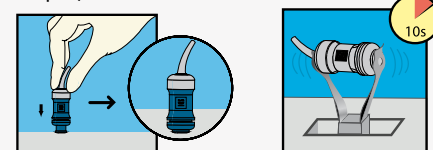


- 5** Τοποθετήστε στην κοιλότητα το Riva Silver.

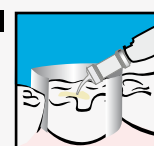

- 6** Διαμορφώστε το και χρησιμοποιήστε τεχνητό τοίχωμα, εάν χρειάζεται.



- 7** Τοποθετήστε Riva Coat και φωτοπολυμερίστε.

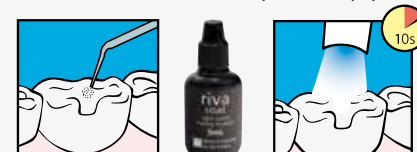

- 8** Το τελικό φινιρίσμα κάτω από σπρέι νερού, μπορεί να ξεκινήσει περίπου σε 6 λεπτά από την αρχή της ανάμειξης.



- 9** Τοποθετήστε Riva Coat και φωτοπολυμερίστε.

# RIVA protect



## Υαλοϊονομερές, προστατευτικό επιφάνειας ενισχυμένο με ACP.

Το **ACP** [άμορφο φωσφορικό ασβέστιο  $\text{Ca}_5(\text{PO}_4)_2$ ] είναι ένα νανομερές πρόσθετο στην ενίσχυση του Riva Protect το οποίο προσθέτει στην οδοντική επιφάνεια επιπλέον ασβέστιο και φώσφορο και συνδυαζόμενο με το φθόριο του γυαλιού στο Riva Protect ενισχύει την επαναμεταλλικοποίηση του δοντιού. Έτσι, το Riva Protect ενδυναμώνει την υποκείμενη οδοντική επιφάνεια, σταθεροποιεί οποιαδήποτε αρχόμενη τερηδόνα και είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για ασθενείς επιρρεπείς προς την τερηδόνα.

## ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

- Προληπτικές εμφράξεις οπών και σχισμών
- Προστασία της επιφάνειας ρίζας / δοντιού
- Πρόληψη της υπερευαισθησίας
- Προσωρινή έμφραξη δοντιού που υπόκειται σε ενδοδοντική θεραπεία
- Υλικό βάσης κατά την έμφραξη κοιλοτήτων
- Ορθοδοντική χρήση (για άνοιγμα δήξης)

## ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- **Υψηλή απελευθέρωση φθορίου.**  
Χάρη στη βιοδραστική, πατενταρισμένη τεχνολογία **ionglass**, το Riva Protect απελευθερώνει σημαντικά περισσότερο φθόριο, βοηθώντας την επαναμεταλλικοποίηση του δοντιού.
- **Είναι ιδανικό για ασθενείς επιρρεπείς προς την τερηδόνα.** Το Riva Protect προσκολλάται απευθείας στο δόντι, ενδυναμώνει την υποκείμενη οδοντική ουσία και σφραγίζει αποτελεσματικά το δόντι από βλαβερά βακτήρια και οξέα.
- **Προστατεύει πολύ καλά τα δόντια που έχουν ανατείλει εν μέρει.**
- **Έχει χαμηλό ιξώδες.** Έτσι διεισδύει βαθιά μέσα στις οπές και σχισμές του δοντιού.  
Η ιδιότητα του αυτή μαζί με την ικανότητά του να προσκολλάται στις οδοντικές ουσίες, του επιτρέπουν να σφραγίζει τις οπές και σχισμές και να εξαλείφει τους χώρους όπου μικρόβια θα μπορούσαν να αναπτυχθούν.
- **Προσκολλάται μόνο του στην οδοντική επιφάνεια και δεν χρειάζεται συγκολλητικό παράγοντα.**
- **Είναι ανθεκτικό στην υγρασία.**

## ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

### Riva Protect κάψουλες.

50 κάψουλες Riva Protect σε απόχρωση λευκή.


**Riva Protect Kit σκόνης/υγρού.** 1 βάζο σκόνης 15g, 1 φιαλίδιο υγρού 10g (9,1ml), 1 Riva Conditioner 10 ml και βοηθήματα. Απόχρωση λευκή.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ


για προληπτική έμφραξη οπών και σχισμών

Καθαρίστε και απομονώστε το δόντι.


- 1 Τοποθετήστε Riva Conditioner για 10 δευτ.

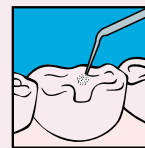



- 2 Ξεπλύνετε σχολαστικά.

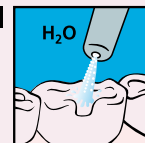


- 3 Απομακρύνετε την περίσσεια νερού. Διατηρήστε την υγρασία.

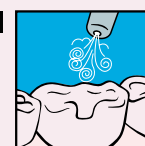


- 4 Δονήστε την κάψουλα σε ένα δοντιό αμαλγάματος ή αναμείξτε σκόνη με υγρό σε ένα μπλοκ ανάμειξης.

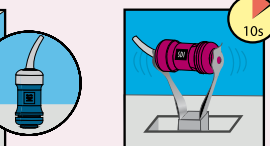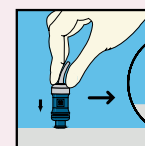

- 5 Τοποθετήστε το Riva Protect στο δόντι.

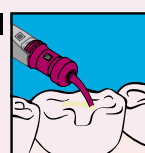

- 6 Απλώστε το υλικό στην οδοντική επιφάνεια.

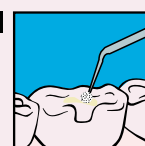

- 7 Όταν το υλικό χάσει την επιφανειακή στιλνότητά του, τοποθετήστε επάνω του ένα λεπτό φιλμ Riva Coat.

- 8 Φωτοπολυμερίστε για 10 δευτερόλεπτα.

- 9 Το τελικό φινιρίσμα κάτω από σπρέι νερού, μπορεί να ξεκινήσει σε 5 λεπτά από την αρχή της ανάμειξης.

# RIVA cem automix

Αυτοπολυμεριζόμενο, ακτινοσκιερό, ρητινωδώς τροποποιημένο υαλοϊονομερές υλικό συγκόλλησης το οποίο απελευθερώνει φθόριο.



## ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

- Μεταλλοκεραμικές στεφάνες και γέφυρες
- Ενδορριζικοί άξονες προκατασκευασμένοι/χυτοί
- Μεταλλικές στεφάνες, γέφυρες, ένθετα, επένθετα, ορθοδοντικές συσκευές και άξονες
- Στεφάνες, γέφυρες, ένθετα κι επένθετα από κεραμικά υψηλής αντοχής
- Ένθετα από κεραμικά χαμηλής αντοχής

## ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- **Δυνατότητα στιγμιαίου φωτοπολυμερισμού για εύκολη αφαίρεση των περισειών.**  
Φωτοπολυμερίζετε τις περίσσειες του υλικού για 5 δευτερόλεπτα ανά επιφάνεια, με ένα υψηλής έντασης φως LED και κατόπιν αυτές αφαιρούνται εύκολα με ένα δρέπανο ή ανιχνευτήρα.
- **Υψηλή αντοχή συγκόλλησης με οδοντίνη και αδαμαντίνη**
- **Υψηλή αντοχή στην κάμψη: 49,3 MPa**
- **Παρατεταμένη απελευθέρωση φθορίου** χάρη στην πατενταρισμένη τεχνολογία **ionglass**.
- **Χωρίς BPA**
- **Χρωματική σταθερότητα**
- **Ρύγχη ανάμειξης με λιγότερη απώλεια υλικού**

Το Riva cem διατίθεται σε ανοικτή κίτρινη απόχρωση.

## ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

2 x 4 g σύριγγες Riva Cem Automix και 16 ρύγχη ανάμειξης.

# riva conditioner

Ζελέ για τον καθαρισμό οδοντίνης και αδαμαντίνης πριν την τοποθέτηση των υαλοϊονομερών.

**Συσκευασία:**  
Φιαλίδιο των 10 ml



# riva coat

Υλικό για την επάλειψη της έμφραξης υαλοϊονομερούς και την προστασία της από την υγρασία το πρώτο 24ωρο.

**Συσκευασία:**  
Φιαλίδιο των 5 ml



# riva applicator 2

Εργαλείο-διανομέας για τις κάψουλες όλων των προϊόντων Riva.



YOUR SMILE. OUR VISION.



Vitsaropoulos  
COMPLETE DENTAL SOLUTIONS